

介護保険給付対象商品・床ずれ防止用具

αPLA L-W

アルファプラ L-W

アルファプラ L
×
エアロテクノ® PR
AEROTECHNO® PR



W のチカラであなたを守る

床ずれ防止


動きやすさ

抗菌

抗ウイルス


「エアロテクノ® PR」とは、小松マテーレ株式会社が開発した抗ウイルス加工素材です。

感染性ウイルス量の変化
(初期を 100 とした場合)

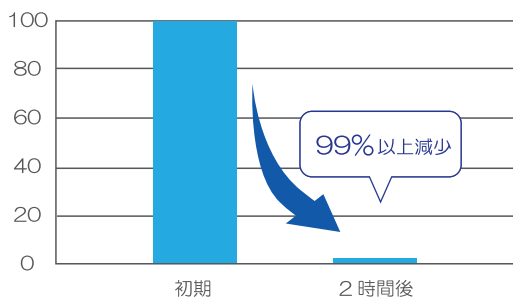

試験対象：エアロテクノ® PR (代表サンプル)

感染性ウイルス量減少の流れ
(イメージ図)

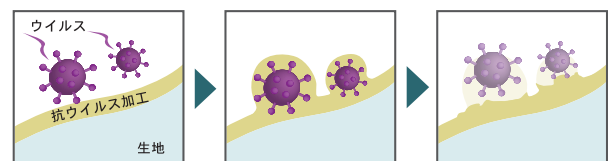

画像提供：小松マテーレ(株)

- 実験室での試験結果であり、試験データは実生活での効果を保証するものではありません。
- 本製品は全てのウイルス、菌による感染を予防するものではありません。また、ウイルス感染の治療を目的とするものではありません。

アルファプラ L-W 抗ウイルス+抗菌 撥水・防水カバータイプ / カラー 表:水色 裏:シルバークレー

型番	MB-LPW3R	MB-LPW3S	MB-LPW1R	MB-LPW1S	MB-LPWOR
サイズ[cm]	幅83×長195×厚10	幅83×長181×厚10	幅91×長195×厚10	幅91×長181×厚10	幅100×長195×厚10
質量[kg]	6.9	6.4	7.6	7.1	8.3
TAISコード	00563-000183	00563-000184	00563-000185	00563-000186	00563-000187
希望小売価格(税込)	111,540円				120,340円
抗ウイルス+抗菌 撥水・防水カバーのみ(税込)	32,670円				37,620円

設置方法：リプレースメントタイプ
材質(中身)：ポリウレタンフォーム/シリコーンゲル
材質(カバー)：表地:ポリエステル 裏地:ポリウレタン



撥水カバー
専用カバーは撥水性が高く、
失禁などによる汚染を防ぎます。

アルファプラ L-W 抗ウイルス+抗菌 通気カバータイプ / カラー 表:水色 裏:こげ茶

型番	MB-LPA3R	MB-LPA3S	MB-LPA1R	MB-LPA1S	MB-LPAOR
サイズ[cm]	幅83×長195×厚10	幅83×長181×厚10	幅91×長195×厚10	幅91×長181×厚10	幅100×長195×厚10
質量[kg]	6.9	6.4	7.6	7.1	8.3
TAISコード	00563-000188	00563-000189	00563-000190	00563-000191	00563-000192
希望小売価格(税込)	111,540円				120,340円
抗ウイルス+抗菌 通気カバーのみ(税込)	32,670円				37,620円

設置方法：リプレースメントタイプ
材質(中身)：ポリウレタンフォーム/シリコーンゲル
材質(カバー)：ポリエステル




通気カバー
吸湿速乾性で
いつでもさらっと快適です。

●サイズ、質量は目安の数値です。

使用方法／取扱上の注意

●「αPLA L-W」とプリントしてある面を上にご使用ください。

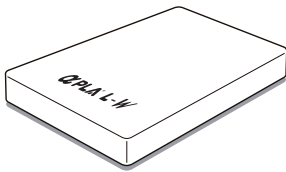

- 通気カバータイプの場合、失禁の心配がある方は、市販の防水シートを併用してください。
- 本製品に人を乗せたまま移動させないでください。落下して怪我をする恐れがあります。
- 本製品の端を強くつかまないでください。内部がちぎれる場合があります。持ち運びの際は、裏面にある持ち手をご利用ください。
- 無理な力(折り曲げる、強くにぎる、引っ張る、ねじる等)を加えないでください。
- 本製品は全てのウイルス、菌に対する効果検証を行ったものではありません。
- ウイルス試験は実験室での実測値であり実際の生活環境で測定したものではありません。
- 抗菌について、医療機関並びにそれに準ずる施設で使用される繊維製品に用いる加工を施しています。
- 製品の仕様は改善などのため、予告なしに変更することがあります。
- αPLA、αPLA L は(株)タイカの登録商標です。

お手入れ方法

カバーのお手入れ方法

●本製品のカバーを洗濯する際は、以下の注意事項をお守りください。

撥水・防水カバータイプ	通気カバータイプ
手洗いしてください。 液温は、40℃を限度としてください。	洗濯機によるお洗濯が可能です。 液温は、60℃を限度としてください。
酸素系漂白剤は使用できますが、塩素系漂白剤は使用できません。	
タンブル乾燥はできません。	
日陰で平干ししてください。	日陰で吊るして乾燥してください。
アイロン掛けはできません。	
ドライクリーニングはできません。	
ウェットクリーニングはできません。	

Taica Wellness

株式会社タイカ ウェルネス事業本部

〒125-0054 東京都葛飾区高砂5-39-4
TEL:03-5648-6630 FAX:03-5648-6640

フリーダイヤル ☎ 0120-152047
ホームページ <https://taica.co.jp/pla/>

