

基本操作ガイド




●この操作ガイドを制御部に取り付けてください


ひざに拘縮がある療養者に使用する際は、**長押し**してください。

横向き側臥位(90°側臥位)の療養者に使用する際は、**長押し**してください。

ベッドの背上げをする際は、**長押し**してください。
※背上げセンサー付モデルは、自動で背上げを感じますので、ボタン操作はできません。

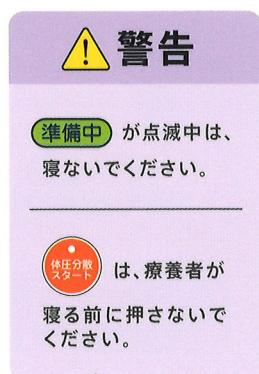

操作パネルの説明

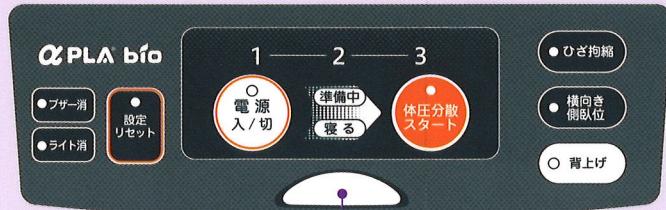

●ブザー消

異常発生時のアラーム音を消す際は、押してください。

●ライト消

「動作確認ランプ」を消灯する際は、押してください。

● 設定
リセット

療養者が変わった時など、設定体重をリセットする際は、長押ししてください。ランプが点滅し電源が切れます。

動作確認ランプ

●正常動作中は、**緑色**  に点灯します。

動作確認ランプの状態	点検のポイント	対処方法	
 「動作確認ランプ」が、 赤色点滅 した。	「体圧分散スタートボタン」を押した後、30秒以上安静にしていましたか？	「設定リセットボタン」を長押しして最初から操作をやりなおしてください。	
	背上げセンサーのコードが断線していませんか？		
 「動作確認ランプ」が 赤色点灯 し動作を停止した。 ※圧力が設定圧力に達しない場合、または設定圧力以上になった等の異常が発生した場合	接続ホースが外れていませんか？	接続ホースを制御部にしっかりと差し込んでください。	点検後、エラーを解除すれば動作を再開します。
	接続ホースが折れ曲がったり、ねじれたりしていませんか？	折れ曲がりや、ねじれのないように設置してください。	
	接続ホースのジョイントが確実に挿入されていますか？	接続ホースのジョイント差し込み口の向きを確かめ確実に挿入してください。	エラーの解除方法
	エアセルが破損していませんか？	カバーを開き、エアセルを触って空気が入っているか確認してください。	

停電時の場合

停電の際は、動作を停止しますが、接続ホースのジョイントを外さなければ、1週間程度マットレスの内圧を保持します。