

つかまない 引きずらない

体位変換に「スムーズ」というやさしさを。

介助者の労力軽減のために

体位変換やマットレス上での移動が楽にできます。

介助で床ずれを作らないために

圧抜き(ズレ力軽減)や引きずらない介助が楽にできます。

感染症対策のために

使い捨てタイプで、焼却しても有害なガスは発生しません。

感染症対策の
ために!!
ディスポーザブルタイプ



〈使用例：マットレス上での横移動〉



介助補助手袋

ハーティイ グローブ

希望小売価格(税込) 6,050 円

フリーサイズ

50枚/箱

型番:CS-HGD


材質:ポリエチレン

ハーティグローブの使用例

P!ポイント 介助をする前に療養者に声をかけてから介助しましょう。

横移動（療養者を引きずらずに移動できます）

P!ポイント 体重のかかる場所に手を差し込みます。

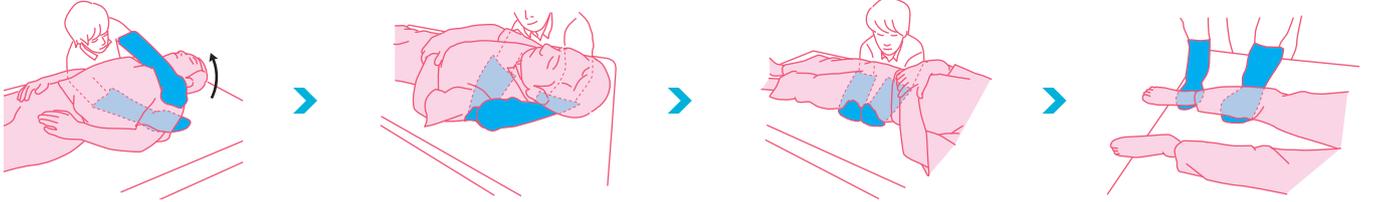

片手を肩甲骨周辺に差し込みます。（反対の手で療養者の奥側の肩を手前に引き寄せると手を差し込みやすくなります。）

両手のひらを合わせるように反対の手を差し込みます。ひじを開いて療養者の頭部をひじに乗せ、両腕を手前に引き寄せます。

臀部は仙骨部周辺に両腕を差し込み手前に引き寄せます。（反対の手で奥側の臀部を手前に引き寄せると手を差し込みやすくなります。）

かかとは手のひらに乗せて手前に運ぶように移動します。

圧抜き

● ベッドアップ

P!ポイント ベッドアップ、ベッドダウン後は必ず圧抜きをしましょう。




片手で奥側の肩を支え上半身を傾けながら、肩口から反対の手を差し込み、背部までなでるようにして圧抜きをします。

仙骨部を中心に腕に乗せるようにして圧抜きをします。

脚部、かかと部は手のひらで包み込むようにして圧抜きをします。

● 車いすへの移乗

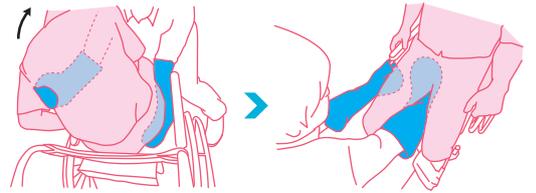


臀部に手を差し込み圧抜きをします。（療養者を前傾し重心を前方に移動すると、スムーズに手を差し込むことができます。）

大腿部は両手で包み込むようにして圧抜きをします。


● ポジショニング

P!ポイント ポジショニング後の圧抜きをすることにより、ポジショニングの効果が高まります。

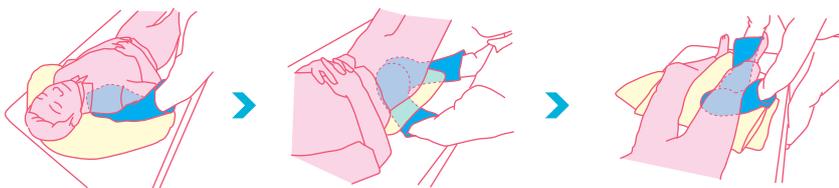


ポジショニング後、ポジショニングをした箇所に手を差し込みなでるようにして圧抜きをします。その後クッションに身体をなじませるように軽く押さえ、同時に衣服のしわを整えましょう。

取付け方

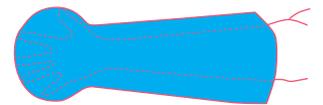

ハーティグローブの中では、手のひらを広げて使用してください。つかむ介助を防ぐことができ、またグローブが抜けにくくなります。

<寸法>

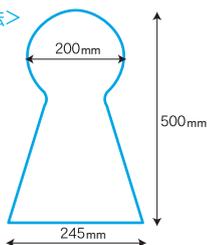

使用上の注意

- ・装着した際に体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
- ・排泄物や血液等で汚染された場合は速やかに廃棄してください。
- ・爪先、刃物などの尖ったもので傷つけないようご注意ください。破れの原因になります。
- ・薬品や溶剤によっては変質する場合がありますので、ご確認の上使用してください。
- ・水や油類等の液体の中での使用を避けてください。液体が中に浸透することがあります。
- ・熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
- ・直射日光が当たる場所、高温、多湿な場所での保管は避けてください。

TaicaWellness

株式会社タイカ ウェルネス事業本部

〒125-0054 東京都葛飾区高砂5-39-4
TEL:03-5648-6630 FAX:03-5648-6640

フリーダイヤル ☎ 0120-152047
ホームページ <https://taica.co.jp/pla/>

