

介助サポートスライディングシート

# スマイルシート


Smile sheet



介護する人を笑顔に。  
される人はもっと笑顔に。

簡単で使いやすいスマイルシートは  
体位変換や移動をスムーズにします。

1. パラシュート用の生地を使用しているため、滑りが良く丈夫です。
2. 洗濯・清拭消毒ができます。
3. Lサイズはほぼ全身をカバーできるので、より多くの場面で活用できます。

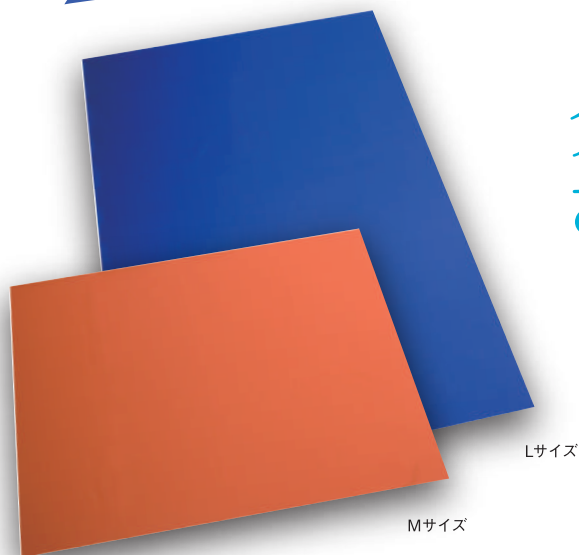


種類	Mサイズ	Lサイズ
色	オレンジ	青
型番	CS-SM-M	CS-SM-L
サイズ [cm]	幅145×長100	幅145×長200
質量 [kg]	0.1	0.2
TAIS コード	00563-000051	00563-000052
材質	ナイロン100%	
希望小売価格 (税込)	9,350 円	15,400 円

## 滑りやすさ

綿シートの約4倍、他社類似品の  
約2倍も滑りやすい。

※右のグラフは綿シートを基準「1」とした場合の  
摩擦係数を測定したもの。値が小さいほど滑りやすい。

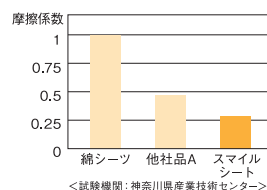

## 洗濯耐久性


150回の洗濯後も性能に変化がないことが実証されています。

●試験機関：豪州検査機関 (AWTA)

社団法人 日本ノーリフト協会 推薦

# ●スマイルシートの使用例 ※スマイルシートは原則二つ折りにして使用します。


## 1. 敷き込み方

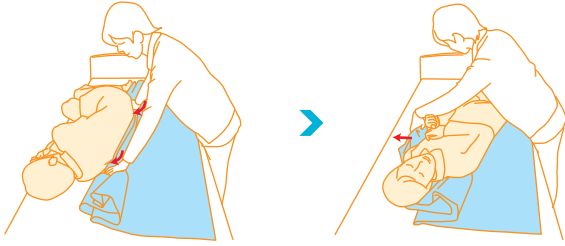

スマイルシートを二つ折りにして患者さんとマットレスの間に敷き込みます。

ベッド全体にスマイルシートが広がるように引き出します。


## 2. はずし方

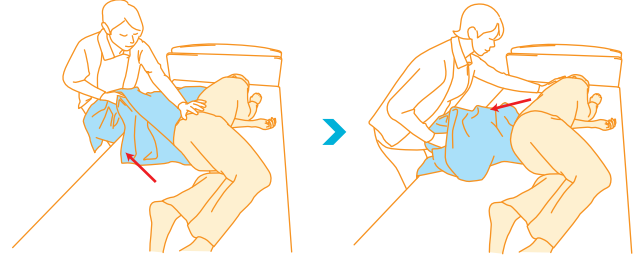

患者さんを支えながら、腰や太ももの隙間から交互に引っ張って抜きとります。

## 3. 上方移動


介助者1人の場合

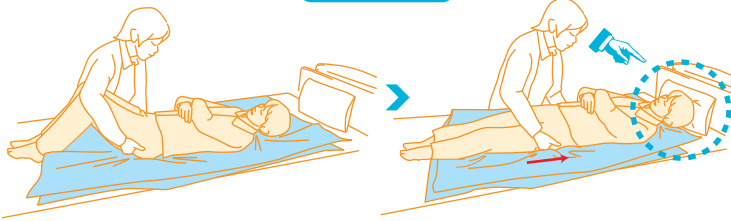

骨盤に両手をあてがい上方に押します。

上下のシート間を滑らせて上方へ移動します。


介助者2人の場合

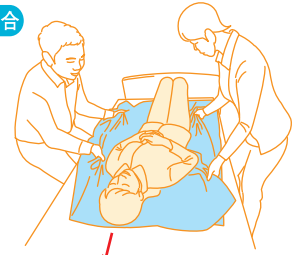

二つ折りにしたスマイルシートの上側一枚を両側からつかみ、上下のシート間を滑らせて上方へ移動します。


**POINT** ▶ 頭がヘッドボードに当たらないよう枕をそえるなどすると良いでしょう。

## 4. 体位変換

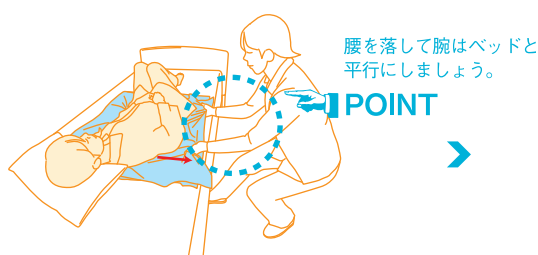

腰を落して腕はベッドと平行にしましょう。

**POINT** ▶

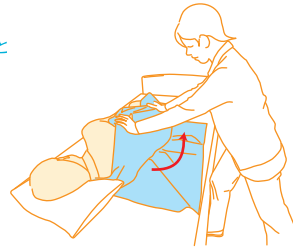


二つ折りにしたスマイルシートの上側一枚を両手でつかみ手前に引きます。

つかんだシートをゆっくり上方に引き上げて寝返りを打つように患者さんの身体を横向きにします。

## 5. 上方移動(ヒップアレー併用)


※より楽に上方移動できます。

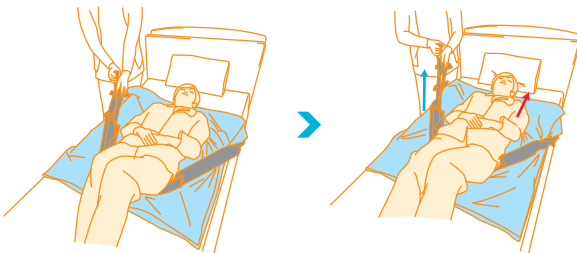

スマイルシートを敷き、ヒップアレーのヒップシートを太腿の付け根あたりにあてがいます。

グリップをたぐり寄せて、身体全体を上方に滑らせるように移動させます。

## 6. 車いすでの座位修正

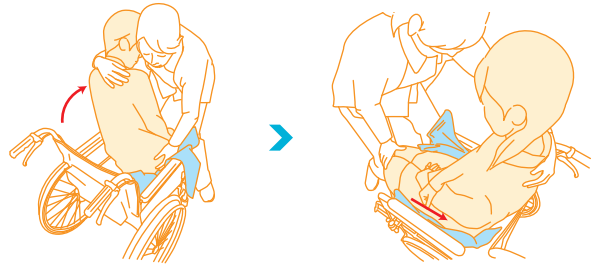

患者さんの上体を斜め前方に倒し、スマイルシートを座面と身体の間敷き込みます。

シートを滑らせて患者さんの身体を奥側に押し込み座位を整えます。

### ●お手入れ方法：

- ・40℃以下の液温で、洗濯機の弱水流で洗ってください。
- ・必ず中性洗剤を使用してください。
- ・形を整えて陰干ししてください。



### ●取扱い上の注意：

- ・滑りやすい素材のため転落転倒の危険があります。ご使用の際は必ず介助者が付き添ってください。
- ・ドライヤーやストーブなど高温のものを近づけないでください。

スマイルシートを使った移動方法や体位変換の勉強会受付中 **無料出張**

お問い合わせ・お申し込みはこちらまで

☎ 0120-152047

Eメールでのお申し込みは、[pla@taica.co.jp](mailto:pla@taica.co.jp)

**TaicaWellness**

株式会社タイカ ウェルネス事業本部

〒125-0054 東京都葛飾区高砂5-39-4  
TEL:03-5648-6630 FAX:03-5648-6640

フリーダイヤル ☎ 0120-152047  
ホームページ <https://taica.co.jp/pla/>

