ポジショニングクッション

い ウェルピー



ポジショニング初心者でも 使いやすいベストラインナップ

レギュラータイプ



ポジショニングは



体位保持 体圧分散

まっすぐ寝ていなくてもポジショニングで乗り越えられる

ウェルピーは理学療法十と共同で開発しました。

体圧分散式マットレスは、真っ直ぐ寝られない方の場合、その性能を十分に発揮できません。 円背、拘縮、片麻痺、痩せの方の体圧分散にはポジショニングの実施をお勧めします。

また、正しいポジショニングは療養者をリラックスさせ、拘縮が緩和されることも・・・ 体位変換だけではない、ポジショニングの深い世界をウェルピーと一緒に学んでいきませんか?

ウェルピーは

「極小ビーズ」+「わた」= 理想のポジショニング

ウェルピーの中材には「極小ビーズ」と「わた」が絶妙なバランスで混合されて います。「極小ビーズ」が隙間を埋めるように身体のラインにフィットし、 「わた」が姿勢をしっかりと保持します。形や大きさが異なる8種類をラインナップ。 その使いやすさを実感してください。

カバーの通気性と吸湿速乾性へのこだわり



メッシュの表面

表面は通気性に優れた3D構 造の生地を使用し、また、ドイ ツで人気のプリント柄で部屋 を明るくします。



レギュラーの全面

通気性と吸湿速乾性に優れ、滑 りにくい生地を使用。また、柔ら かい肌ざわりなので、いつまでも 触っていたくなる心地よさです。





フィット

中材はゆったりと余裕を持たせてありますので、 自由に動かすことができます。



ウェルピーのご使用例

身体を支える

スティック(大)、スティック(小)とミニを組み 合わせて30度側臥位をつくります。



体圧を分散する

ジャンボ、ブーメラン(小)とウェーブ、 スティック(大)、ピローの5種を組み合わせ、 マットレスと身体にできる隙間を埋めます。 より広い面で身体を支えることができ、 体圧分散力が高まります。

姿勢を保持する

スティック(小)を2個使用して背もたれと背中 の隙間を埋めます。



緊張を緩和する

車いす使用時、ブーメラン(大)にて 上体を起こし、緊張を緩和します。



オプションで

超撥水加工で汚れがつきにくく落ちやすい!



快適で衛生的な 超撥水加工

身体の動きに追従する 優れた伸縮性



い ウェルピー は様々なシーンで使い分けられる8タイプをラインナップ



●写真はメッシュタイプです。●価格はすべて税込です。

中身:ポリエステルわた、ポリスチレンビーズ(※1)

生地: 表地/ポリエステル100% 裏地/ポリエステル100%

カラー: クリーム色

〈超撥水カバー〉

生地:ポリエステル カラー:ベージュ

〈メッシュ〉

中身:ポリエステルわた、ポリスチレンビーズ(※1)

生地:表地/ポリエステル76%、ナイロン24%(旭化成フュージョン®使用) 裏地/ポリエステル100%

カラー:オレンジ系チェック柄 ※1:ミニタイプはボリエステルわたのみ

お問い合わせ先

材

質