

ご使用になる前に

- ご使用前にキズ、ほころび、汚れ等がないことを、必ずご確認ください。厳重な品質管理のもと製造しておりますが、万一不備がありましたら、お手数ですが、(株)タイカへご連絡ください。
- 開封直後、ウレタンフォームの臭いが気になる場合がございますが、身体に害を与えるような有害物質は含んでおりません。臭いはしばらくすると自然に消えますのでご安心ください。

商品の交換・返品について

- お手元に商品が届きましたら、速やかに商品をご確認ください。
- 商品不良の場合は、(株)タイカまたは取扱店にご連絡ください。

Taica

株式会社タイカ ウエルネス事業本部
〒125-0054 東京都葛飾区高砂5-39-4
Tel:03-5648-6630 Fax:03-5648-6640

2017.11.2000

立ち上がりサポートマットレス

αPLA すくっとRe

体圧分散式マットレス

アルファプラ すくっと Re

- 通気カバータイプ
- 防水フィルムカバータイプ



取扱説明書

ご使用になる前に必ずお読みください。

安心してご使用いただくために

安心してご使用いただくために、以下のことを必ず守ってご使用ください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

心臓マッサージ等、身体に力を加える処置でのご使用はお控えください。力が分散し適切な処置ができない可能性があります。

本商品に人を乗せたまま移動させないでください。落下して怪我をする恐れがあります。

ベッドサイドレール、介助バー等と、本商品とのすき間に手などを挟まれないようにご注意ください。怪我をする恐れがあります。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

表と裏を間違えて使用されると、本商品の性能が十分に発揮されませんのでご注意ください。

本商品の上に体圧分散を妨げるような厚手の敷物を敷かないでください。効果的に減圧されない可能性があります。

本商品の端を強くつかまさないでください。内部がちぎれる場合があります。持ち運びや移動時には、両手で挟みこむようにしてください。

汗を多くかけられる方が使用する場合は、体位変換や空調管理を十分に行ってください。また、シーツやパッド等の洗濯交換を適宜行ってください。

本商品をマットレス洗浄機やオートクレープ等の滅菌機にかけると、破損する可能性があります。事前に(株)タイカまでお問い合わせください。

直射日光に当てないようにしてください。変質の原因になります。


高温のもの(ドライヤー、ストーブ、アイロン等)および低温のもの(ドライアイス等)に近づけないでください。変質の原因になります。

火または温度の高いものに近づけないでください。火災の危険があります。

無理な力(強くにぎる、引っ張る、ねじる等)を加えないでください。

使用方法 / 取扱上のご注意

●「αPLA すくっと Re」とプリントしてある面を上にご使用ください。

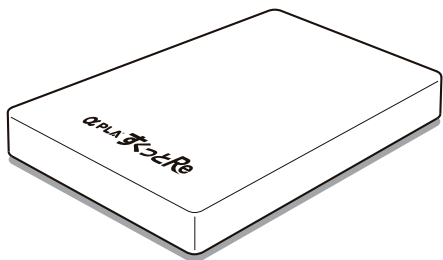

- 伸縮性の高い市販のシーツを敷いてご使用ください。
- 通気カバータイプの場合、失禁の心配がある方は、防水シーツを併用してください。
- 本商品に人を乗せたまま移動させないでください。落下して怪我をする恐れがあります。
- 端を強くつかんで持つと破損する恐れがあります。持ち運びや移動時には、両手で挟みこむようにしてください。
- 本商品を折り曲げないでください。内部構造が破損する可能性があります



お手入れの方法

【カバーのお手入れ方法】

●本商品のカバーを洗濯する際は、以下の注意事項をお守りください。

通気カバータイプ	防水フィルムカバータイプ
洗濯機によるお洗濯が可能です。液温は、60°Cを限度としてください。	手洗いしてください。液温は、30度を限度としてください。
酸素系漂白剤は使用できますが、塩素系漂白剤は使用できません。	
タンブル乾燥はできません。	
日陰で吊るして乾燥してください。	風通しのよい日陰で、平干してください
アイロン掛けはできません。	
ドライクリーニングはできません。	
ウエットクリーニングはできません。	

【本体のお手入れ方法】

- 汚れた場合
乾いたタオルもしくは固く絞ったぬれタオルでたくようにして拭いた後、十分に乾燥させてからご使用ください。
- 除菌消臭剤
市販のアルコールや除菌消臭剤はフォームの劣化を促進させる恐れがありますので使用しないでください。
- 乾燥
定期的に風通しのよい日陰で立てかけて乾燥させることをおすすめします。
- クリーニング
専用の装置が必要です。通常のクリーニングでは破損の恐れがありますので、(株)タイカまたは取扱店にご相談ください。
- 洗浄業者様へ
本商品をマットレス洗浄機やオートクレーブ等の滅菌機にかけると、破損する可能性があります。事前に(株)タイカまでお問い合わせください。

保管方法

- 汚れを落とし、風通しのよい日陰で保管してください。変形防止のため商品に負荷をかけるしないでください。

廃棄について

- 本商品を廃棄する場合は、各自治体の条例に従ってください。
- 配達に使用した梱包材料は、一般ゴミとして廃棄が可能です。

商品仕様

		通気カバータイプ	防水フィルムカバータイプ	
材質	カバー	ポリエステル	「上面」 表地: ポリウレタン 裏地: ポリエステル 「下面」 ポリエステル	
	中身	ポリウレタンフォーム		
サイズ	83 cm 幅	レギュラー	TS-SKT-ReA3R	TS-SKT-ReW3R
			幅83×長191×厚8(cm)	
	ショート	TS-SKT-ReA3S	TS-SKT-ReW3S	
		幅83×長180×厚8(cm)		
	91 cm 幅	レギュラー	TS-SKT-ReA1R	TS-SKT-ReW1R
			幅91×長191×厚8(cm)	
ショート		TS-SKT-ReA1S	TS-SKT-ReW1S	
		幅91×長180×厚8(cm)		

※商品の仕様は改善などのため、予告なしに変更することがあります。