








4

お洗濯の方法

・本商品のカバーを洗濯する際は、以下の注意事項を必ずお守りください。

撥水・通気カバータイプ	撥水・防水カバータイプ
 洗濯機によるお洗濯が可能です。液温は、60°Cを限度としてください。	 手洗いしてください。液温は、30度を限度としてください。
 酸素系漂白剤は使用できますが、塩素系漂白剤は使用できません。	
 タンブル乾燥はできません。	
 日陰で吊るして乾燥してください。	
 アイロン掛けはしないでください。	
 ドライクリーニングはできません。	
 ウェットクリーニングはできません。	

※洗濯時はファスナーを閉めた状態で洗濯袋を用いて行ってください。

5

その他お手入れの方法

マットレス本体(フォーム部)のお手入れについて

- ・汚れた場合
乾いたタオルもしくは固く絞ったぬれタオルでたたくようにして拭いた後、十分に乾燥させてからご使用ください。
- ・除菌消臭剤
市販のアルコールや除菌消臭剤はフォームの劣化を促進させる恐れがありますので使用しないでください。
- ・乾燥
定期的に風通しのよい日陰で立てかけて乾燥させることをおすすめします。変形防止のため、長期保管の場合には、「保管方法」をご参照ください。
- ・クリーニング
専用の装置が必要です。通常のクリーニングでは破損の恐れがありますので、(株)タイカまたは取扱店にご相談ください。

6

保管方法

・保管時はフォームの汚れを落とし、風通しのよい日陰で平置きしてください。上に物を乗せないでください。

7

商品の交換・返品について

- ・お手元に商品が届きましたら、速やかに商品をご確認ください。
- ・欠品、商品不良の場合は、(株)タイカまたは取扱店にご連絡ください。

8

廃棄について

- ・マットレスを廃棄する場合は、各市町村の条例に従ってください。
- ・配達に使用しました梱包材料は、一般ゴミとして廃棄が可能です。

9

商品仕様

タイプ	撥水・通気カバータイプ	撥水・防水カバータイプ		
カバー	表面: ポリエステル100% 裏面: ポリエステル100%	表面: ポリエステル100% 裏面: ポリウレタン100%		
中身	ウレタンフォーム、 <i>ALGEL</i> (特殊シリコン)			
サイズ	83 cm 幅	レギニャー	TS-SKT-A3R	TS-SKT-W3R
		ショーツ	幅83cm × 長191cm × 厚9cm	
	91 cm 幅	レギニャー	TS-SKT-A3S	TS-SKT-W3S
		ショーツ	幅83cm × 長180cm × 厚9cm	
91 cm 幅	レギニャー	TS-SKT-A1R	TS-SKT-W1R	
	ショーツ	幅91cm × 長191cm × 厚9cm		
		ショーツ	幅91cm × 長180cm × 厚9cm	

※ 商品の仕様は改善などのため、予告なしに変更することがあります。



株式会社タイカ ウエルネス用品部

〒125-0054 東京都葛飾区高砂5-39-4
Tel: 03-5648-6630 Fax: 03-5648-6640
フリーダイヤル 0120-152047

ご使用になる前に必ずお読みください。

体圧分散式マットレス

アルファプラ® すくっと

- 撥水・通気カバータイプ
- 撥水・防水カバータイプ



取扱説明書

1 安心してご使用いただくために

安全上のご注意

安心してご使用いただくためにも、以下の事を必ず守ってご使用ください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

心臓マッサージ等、反動力の強い、床等の上でないと効果のない処置が予測されるような方へのご使用はお控えください。

人を乗せたまま本商品を移動させないでください。落下して怪我をする恐れがあります。

ベッドサイドレール、介助バー等と、本商品とのすき間に手などを挟まれないようにご注意ください。怪我をする恐れがあります。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

表と裏を間違えて使用されると、本商品の性能が十分に発揮されませんのでご注意ください。

本商品の上に体圧分散を妨げるような厚手の敷物を敷かないでください。効果的に減圧されない可能性があります。

本商品の端を持たないでください。内部がちぎれる場合があります。持ち運びや移動時には、両手で挟み込むようにしてください。

ピン等の突起物で穴を開けないよう、お気をつけください。ゲルやフォーム層を傷つけ、本来の性能が発揮されない可能性があります。

汗を多くかかれる方が使用する場合は、体位変換や空調管理を十分に行ってください。また、シーツやパッド等の洗濯交換を適宜行ってください。

本商品をマットレス洗浄機やオートクレープ等の滅菌機にかけると、破損する可能性があります。事前に㈱タイカまでお問い合わせください。

変質の原因となりますので、直射日光に当てないようにしてください。


変質あるいは変色の原因となりますので、高温のもの(ドライヤー、ストーブ、アイロン等)および低温のもの(ドライアイス等)に近づけないでください。

火災の原因となる可能性がありますので、ドライヤー、ストーブ、アイロン等、高温のものに近づけないでください。

無理な力(強くにぎる、引っ張る、ねじる等)を加えないでください。

2 梱包内容の確認

梱包内容	数量
アルファプラ すくっと	1枚
取扱説明書	1部

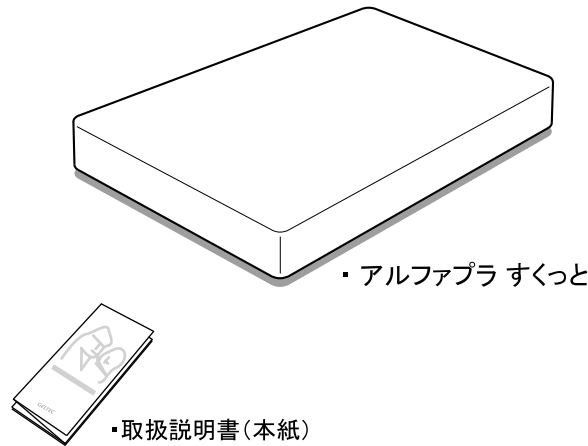

- ・キズ、ほころび、汚れ、ファスナーのトラブル等がないかどうか、ご使用前に必ずご確認ください。厳重な品質管理のもと製造しておりますが、万一不備がありましたら、お手数ですが、㈱タイカへご連絡ください。
- ・開封直後、特殊フォームの臭いが気になる場合がございますが、体に害を与えるような有害物質は含んでおりません。臭いはしばらくすると自然に消えますのでご安心ください。


3 使用方法/取扱上のご注意

- ・本商品には表裏があります。表裏を間違えると本商品の性能(体圧分散性能、動きやすさ)が十分に発揮されませんのでご注意ください。

(カバーのチャックを開けた際、コーナーテープが貼ってある面が表です。)

- ・伸縮性の高い市販のシーツを敷いてご使用ください。

※撥水・通気カバータイプの場合
失禁の心配がある場合は、防水シーツを併用してください。

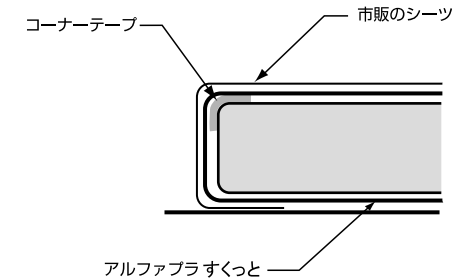

・床、畳、ベッド、すのこ等の上で使用します。

- ・人を乗せたまま本商品を移動させないでください。落下して怪我をする恐れがあります。
- ・ぶら下げると破損する恐れがあります。
- ・本商品を折り曲げないでください。内部構造が破損する可能性があります。

